

## Användarinstruktion

### Handkontroll och Sidpanel LUNA IPX4

**1. ON-** funktionen går efter en tid in i "Sleep" mode och ska därefter aktiveras med att trycka antingen på Ned (3) eller Upp (4) knappen på handkontrollen.

**2. BATT** - Indikerar batterinivå.

LED Färg

Grön- På handkontrollen:

Lampan blinkar under laddning, lyser konstant vid fulladdning.

På LUNA lyften: Lyser konstant som visar batteriet fulladdat.

Gul - Lampan på LUNA lyften lyser och indikerar är laddat till hälften 50%, ladda batteriet för att undvika urladdning.

Röd - Lampan på LUNA lyften lyser och indikerar att batteriets laddning är nere på en kritisk nivå, lampan blinkar och avger akustisk signal "Bip", LUNA lyften ska omgående sättas i laddposition och laddas i minst 24 timmar.

OBS. Lyften kan INTE laddas för mycket.

**3 - 4. UPP/NER-** knappar

**5. KONTAKT** - till handkontrollen.

**6. DEKAL** - , upplyser om typ, serienummer och symbolangivelse.

**7. NÖDSÄNKNING** - används endast i nödsituationer i de fall knapparna inte verkar upp eller ner.

**8. STOP** - Tryck för att nödstoppa lyften omedelbart. Denna funktion kan deaktiveras med att hålla Reset-knappen intryckt i ca 5 sekunder. Se punkten 9, nedan.

**9. RESET** - Används efter ett nödstop. Håll Resetknappen intryckt i 5 sekunder varefter den röda dioden slocknar och lyften är nu aktiverad. Reset kan också användas i situationer när man har behov att låsa alla funktioner i lyften för att förhindra ofrivilligt användande av till exempel brukaren.

När resetknappen hålls intryckt, vill diodlampan lysa rött och alla funktioner är låsta. Deaktiveras samma som efter ett nödstopp.

**10. TILLVAL** - Denna funktion levereras inte på en standard handkontroll. Den extra utgång används evetueellt till fler funktioner som eldrivna tillbehör.

